









utilizar una jeringa grande o un chorro de agua pulsátil para limpiar bien todos los canales y luces con la solución.

- Frote los instrumentos con un cepillo suave.
- Aclare los instrumentos con agua fría.
- Sumerja las muestras en la solución de limpieza/desinfección y homogeneice con ultrasonidos durante 15 minutos a 40 °C (104 °F).
- Frote los instrumentos con un cepillo suave.
- Aclare los instrumentos con agua desionizada.
- Seque los instrumentos con un paño absorbente, limpio y desechable Kimwipe o equivalente.
- Inspeccione visualmente los instrumentos para eliminar completamente cualquier residuo. Si los dispositivos no están visualmente limpios, repita la limpieza manual.

#### **Desinfección**

Podrá utilizar una solución de desinfección según lo indicado en las instrucciones del fabricante.

Si utiliza un sistema de limpieza automático, podrá seleccionar un aclarado final a 60 °C durante 20 minutos para efectuar una desinfección térmica.

#### **Mantenimiento y reparación**

**Atención: El uso de instrumentos dañados puede aumentar el riesgo de traumatismo e infección de los tejidos y la duración de las intervenciones quirúrgicas.**

**Atención: No intente reparar ningún instrumento de Extremity Medical.**

Si un instrumento de Extremity Medical requiere reparación o mantenimiento, envíelo en la caja de Extremity Medical u otra caja sólida y resistente, dentro de un embalaje adecuado para proteger el instrumento. Envíe el paquete a:

Extremity Medical, LLC  
300 Interpace Parkway  
Suite 410  
Parsippany, NJ 0705 (Estados Unidos)  
**A/A: Extremity Medical Technical Services**

**Nota:** Los instrumentos que envíe a Extremity Medical deben ir acompañados de una declaración que certifique que dichos instrumentos se han limpiado y desinfectado minuciosamente. Si no se proporcionan pruebas de dicha limpieza y desinfección, se le cobrará por la limpieza y se producirá un retraso en el procesamiento de la reparación del instrumento.

#### **Inspección y comprobación del funcionamiento**

Todos los instrumentos: Inspecciónelos visualmente para descartar daños y desgaste. Si los instrumentos están conectados con otros dispositivos, examínelos para asegurarse de que la zona de contacto no esté dañada.

Asegúrese de que no haya malas alineaciones, muescas ni puntas dobladas o fracturadas. Inspeccione mecánicamente las piezas activas para asegurarse de que los instrumentos funcionen correctamente. Elimine los instrumentos que estén manchados, descoloridos o dañados.

#### **Embalaje**

Los implantes e instrumentos se pueden cargar en bandejas especiales o en bandejas multiuso. Envuelva las bandejas siguiendo un método adecuado.

#### **Almacenamiento**

Los implantes e instrumentos de Extremity Medical deben estar completamente secos antes de su almacenamiento, y deben manipularse con cuidado para evitar daños. Consérvelos en las bandejas designadas y en lugares que proporcionen una buena protección frente al polvo, los insectos, los vapores químicos y los cambios extremos de temperatura y humedad.

#### **Esterilización**

##### **Implantes**

Los implantes de KinematX se suministran estériles.

**No vuelva a esterilizarlos.**

##### **Instrumentos**

Procedimiento de esterilización/resterilización del instrumento:

Los siguientes procedimientos de esterilización se han aprobado de conformidad con los requisitos de las normas ISO 17664, ISO 17665 y AAMI TIR12:

	Ciclo (EE. UU.)	Ciclo (UE)
<b>Tipo de esterilizador</b>	Prevacío	Prevacío
<b>Temp. mínima</b>	132 °C	134 °C
<b>Exposición*</b>	4 minutos	3 minutos
<b>Tiempo de secado</b>	30 minutos	

#### **RESPONSABILIDAD**

Extremity Medical rechusa toda responsabilidad en caso de desviación de las instrucciones antedichas.

#### **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

Para obtener más información sobre el sistema KinematX o una copia del manual de técnicas quirúrgicas o de las instrucciones de limpieza y esterilización del sistema KinematX, visite [www.extremitymedical.com](http://www.extremitymedical.com) o póngase en contacto con Extremity Medical, LLC o con su distribuidor local de Extremity Medical.

Los implantes e instrumentos de Extremity Medical se fabrican en los Estados Unidos.



**Extremity Medical, LLC**  
300 Interpace Parkway, Suite 410  
Parsippany, NJ 07054 USA  
TEL 1 973 588 8980

AUSTRALIAN  
SPONSOR

LMT Surgical Pty Ltd  
11/97 Castlemaine St  
Milton, QLD 4064  
Australia



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



LBL-115-99101-M REV B  
4/2019